

# T/MS – Maske

## Wiederverwendbare Mund – Nasen - Bedeckung aus TPE-SEBS

Die Masken aus TPE-SEBS kann als Barriere für eine Übertragung von Atemtröpfchen oder Speichel beim Atmen, Husten oder Niesen helfen und dient dem Schutz des Gegenübers.

### Vorteile:

- Wiederverwendbar
- Waschbar
- Austauschbarer Filter
- Größenverstellbar
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Made in Germany



### Anwendung:

1. Vor dem Anlegen der Mund-Nasen-Bedeckung die Hände gründlich waschen (min. 20 – 30 Sek. mit Seife).
2. Die Bänder von oben mit der Spitze durch die vorgesehenen Ösen ziehen.
3. Maske an den äußeren Laschen anfassen, zum Gesicht führen und die Laschen hinter den Ohren befestigen.
4. Die äußeren Laschen durch ziehen der Bänder anpassen, sodass die Maske angenehm auf dem Gesicht sitzt.
5. Vor Absetzen der Maske die Hände gründlich waschen und die Maske über die äußeren Laschen abnehmen.
6. Nach Verwendung der Maske, wie unter den Hygienehinweisen angegeben, reinigen.

### Hygienehinweise:

- Vor Erstgebrauch und nach jedem Tragen die Maske gründlich reinigen.
- Waschbar in der Waschmaschine bei 95 Grad
- Auskochen mit heißem Wasser (Kochtopf oder Wasserkocher)
- Autoklavieren (Form der Dampfsterilisation)
- Die Maske sollte immer von der gleichen Person getragen werden.

### Sicherheitshinweise:

- Die Maske sollte nur für den privaten Gebrauch genutzt werden.
- Die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, sind weiterhin einzuhalten.
- Es sollte der empfohlene Sicherheitsabstand von 1,50 m eingehalten werden.
- Beim Anziehen sollte darauf geachtet werden, dass die Innenseite nicht kontaminiert wird.
- Die Außenseite der gebrauchten Maske ist potentiell erregend. Um eine Kontamination der Hände zu verhindern, sollte diese möglichst nicht berührt werden.
- Der verwendete Kunststoff ist unbedenklich und es kann davon ausgegangen werden, dass keine Reizung der Haut hervorgerufen wird.